

Base dei modelli


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- Il fondo del modello deve essere **piano**
- Il fondo della preparazione deve essere **piano**
- La preparazione non deve avere un perno sul fondo
- Il modello deve essere pieno, cioè vuoto (scavato)

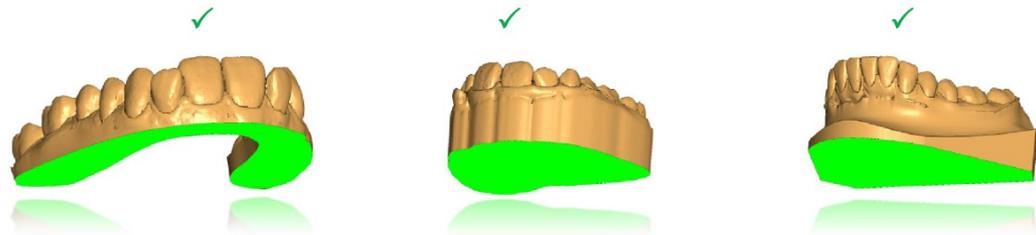

Etichettatura del modello


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- Un'etichetta e' necessaria per l'identificazione
- L'etichetta deve riferirsi all'ordine
- Se non c'e' etichetta, Innovation MediTech GmbH inserirla a pagamento

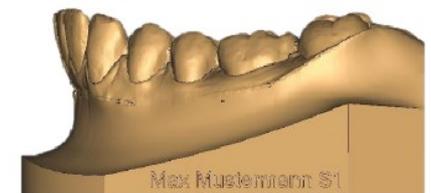

Altezza del modello


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- L'altezza massima del modello e' 32mm

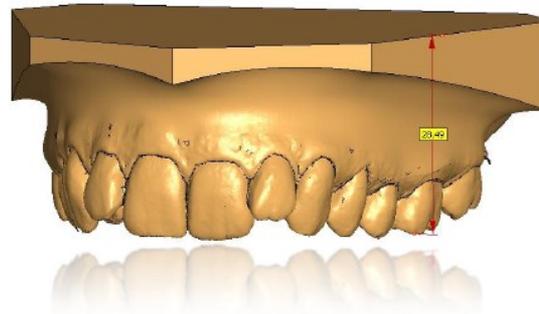

Le forme standard


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note


- Modello a ferro di cavallo (1)
- Modello ortodontico con parte palatina senza zoccolo (2)
- Modello ortodontico con parte palatina con lo zoccolo (3)

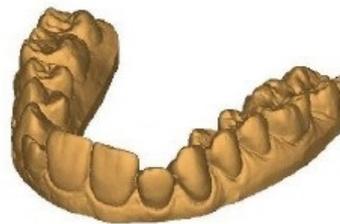

1



2

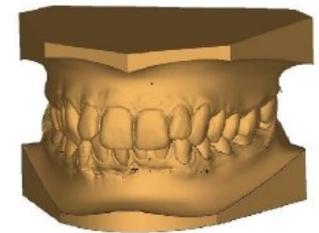

3

Altezza dello zoccolo


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- L'altezza massima della base (dal bordo alla piega mucolabiale) e' 3mm

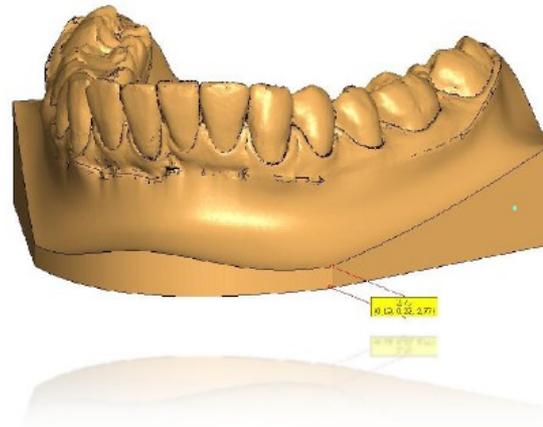

Parametri del modello


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- Tipo di produzione del modello: Standard / predefinito
- Altezza del modello: 3-5mm
- Espansione del modello: 0,2mm

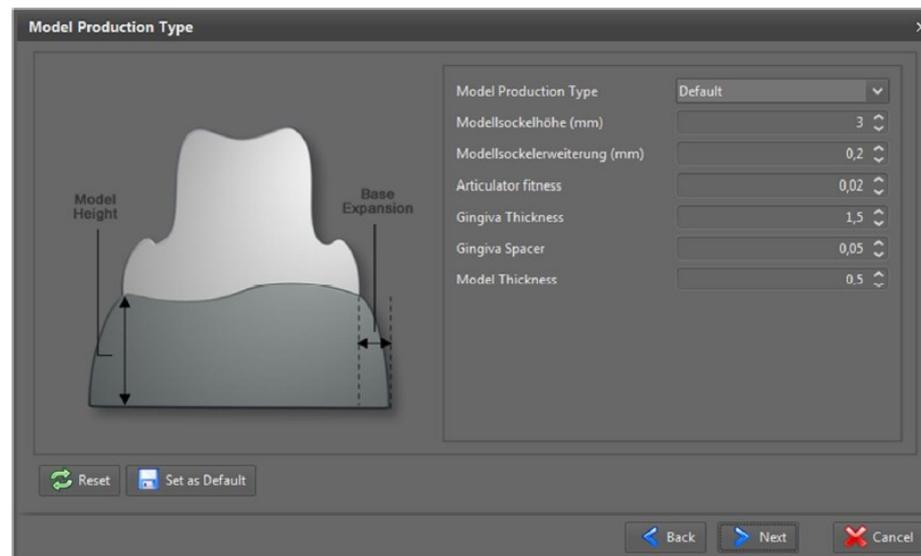

Parametri del modello


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- Tipo di perno: Geller
- Espansione del margine: 0,2
- Distanza dell'incastro: 0,03
- Altezza del solco: 0,8
- Profondita' del solco: 0,15

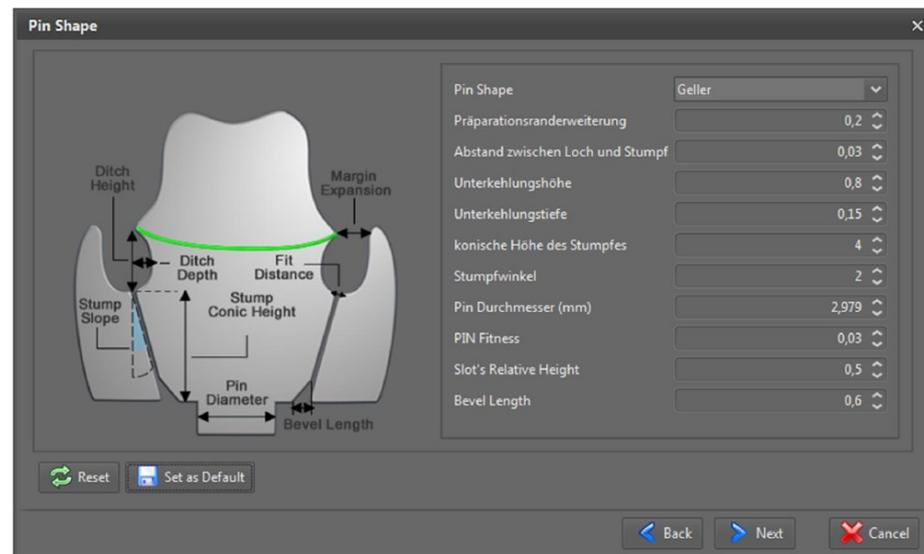

Parametri del modello


Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- Altezza del moncone conico: 4
- Pendenza del moncone: 2
- Altezza relativa della fessura: 0,5
- Lunghezza dell'angolo: 0,6

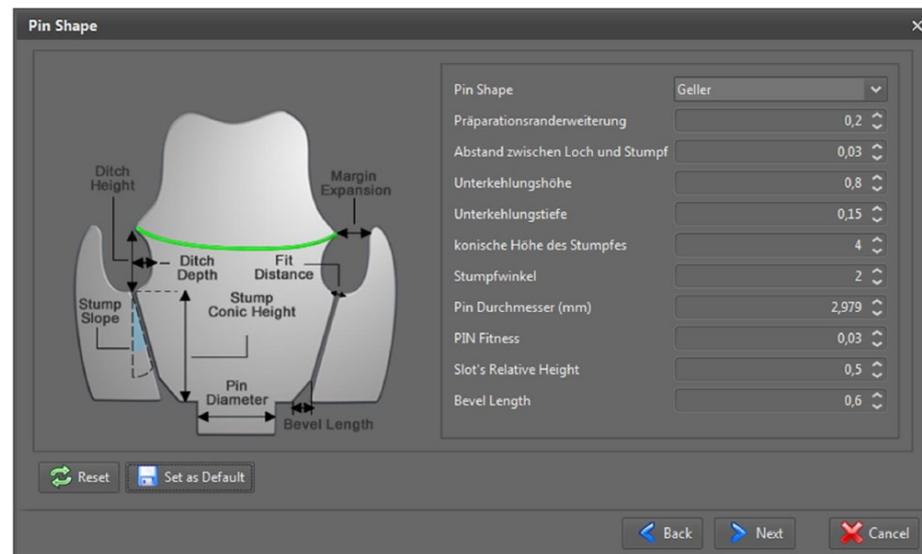

Requisiti fondamentali

Modelli ortodontici

DentalWings

Note

- Trasferire tutti i dati digitali come file STL a Innovation MediTech GmbH
- Modelli tagliati con perni a spillo (per es. SIRONA) sono esclusi dalla produzione